

Інструкція по підготовці місця для монтажу стоматологічної установки «Клас А» "ANTHOS" (Італія).

Вимоги до приміщення:

- приміщення в якому виконується монтаж Обладнання має бути з повністю закінченим ремонтом, має бути прибраним і в ньому не мають бути залишки упаковок з будь-якого товару та Обладнання.
- у приміщенні попередньо повинне бути проведене вологе прибирання.
- у день проведення монтажу Обладнання , у приміщенні не повинні виконуватися інші роботи.
- приміщення стоматологічної клініки мають бути обладнанні працюючим санвузлом
- у зимню пору року приміщення повинні бути обігрітими

Вимоги до підводів комунікацій

. Під монтажем Обладнання мається на увазі сборка та наладка комплекту, що знаходиться у заводській упаковці. Замовник власними силами та за власний рахунок забезпечує гідну підготовку монтажного місця згідно вимогам до комунікацій, що наведені нижче, та розмірам, згідно технічної документації виробника.

1. ВОДА. (Вивід «D»).

- Тиск у магістралі 2,5 – 6,0 бар.
- Якість питної води.
- У разі необхідності встановлюється фільтр 50 мк.
- Жорсткість води від 6 до 10 рН = 1,074 – 1,790 ммоль/л.
- Забезпечити з'єднання : різьба 1/2" внутрішня (вивід над рівнем підлоги не більш 30 мм).
- Кран для вимкнення води має бути розташований у легкодоступному місці кабінету.і не повинен бути розташований на місці вивіду водяної труби з підлоги.

2. ПОВІТРЯ. (Вивід «С»).

- Стисле повітря має бути сухим та чистим (без водяного конденсату, парів компресорної оливи и твердих часток).
- Тиск повітря, що подається - 6,0 – 8,0 бар.
- Забезпечити з'єднання : різьба 1/2" внутрішня (вивід над рівнем підлоги не більш 30 мм).
- У випадку використання централізованої системи подачі стислого повітря кран для вимкнення повітря на установку має бути розташований у легкодоступному місці кабінету і не повинен бути встановлений на місце вивіду магістралі з підлоги

• КАНАЛІЗАЦІЯ. (Вивід «А»).

- Пластикова труба d- 40 мм (вивід над рівнем підлоги не більш 20 мм).
- Схилення - не менш 1 см/м (1:100).

3. АСПРАЦІЯ. (Вивід «В»).

- Пластикова труба d- 40 мм (вивід над рівнем підлоги не більш 20 мм).

4. ЕЛЕКТРОПРОВОДКА. (Вивід «Е»).

- Електродріт 2,5 х 3 мідний, багатожильний , вивід з підлоги 0,5 м.
- Окремий електро автомат не менш 10 А.

5. КЕРУВАННЯ АСПРАЦІЄЙ (Вивід «Е»).

- Дріт 1,0 х 2, м. мідний, багатожильний , вивід з підлоги 0,5 м

6. МУЛЬТІМЕДІА. (Вивід «М»).

- Для прокладання комунікацій- труба діаметр- 50 мм (вивід над рівнем підлоги не більш 20 мм).





